

▶ **BESTILLINGSINFORMATIONER**

Varenummer	Beskrivelse	Længde på ben, medialsiden
24-0170-4-13066	Cool IROM®, Kort	< 80 cm
24-0175-4-13066	Cool IROM®, Lang	> 80 cm

Tilbehør	Beskrivelse
11-0024-x	Ankelbøjle, højre
11-0026-x	Ankelbøjle, venstre
11-1389-0-13000	Fuldt polster (10 stk)
11-1408-2	Stropper, 6 stk/kit

HOUSE OF QUALITY BRANDS




2009/12




NEVER STOP GETTING BETTER®
BRUGERVEJLEDNING



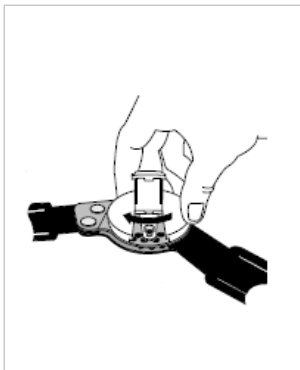

Inden skinnen sættes på patienten indstilles den ønskede fleksion / ekstension på følgende måde:

1. Tryk ned og træk ud i det lille firkantede låg.
2. Indstil den ønskede fleksion / ekstension ved at dreje på plastik dækslet. Indsæt stoppinden ved ønskede gradtal.
3. Drej dækslet tilbage og luk låget.

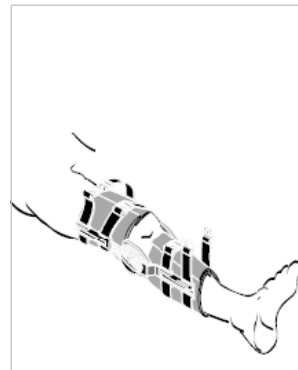


Spænd først de to stropper tættest på knæet. Derefter de øvrige. Vær opmærksom på, at stropperne kommer til at sidde tæt ind til bagsiden af benet.

(På billedet er der aftegnet 2x2 stropper og ikke 3x3 stropper som på IROM skinnen, se billedet side 1).




Polsteret kan klippes til i bredde og længde (både på lår og læg) og derved tilpasses patientens størrelse.

Polsteret vikles omkring benet og klippes til, så der er et overlap på ca. 4 cm. Det hæfter foran på benet.

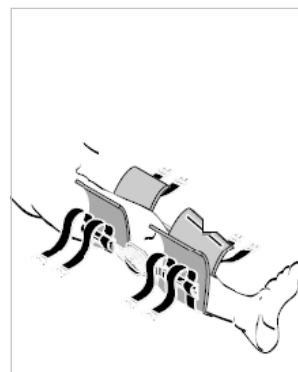

Ved at løsne stropperne og åbne polsteret kan skinnen både tages af og sættes på som en helhed.

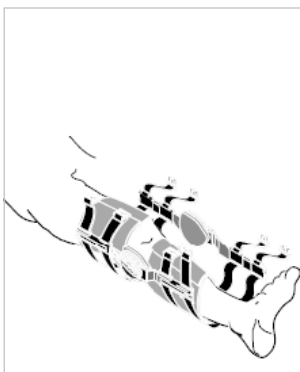

Den laterale og den mediale skinne skal placeres udfor benets midterlinier.

Hængslerne skal placeres med halvdelen af leddet over patellas overkant.